


# ویوالاین

همان آراف و کیوم NEMESIS است

اما بسیار پیشرفته تر!

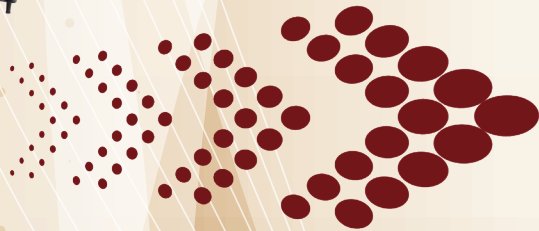

2021



قبل از آن که بررسی دستگاه آراف و کیوم VIVALINE را آغاز کنیم، بهتر است کمی درباره ورژن قدیمی آن، یعنی دستگاه آراف و کیوم NEMESIS صحبت کنیم. دستگاه نام آشنا NEMESIS از سال ۲۰۱۰ توسط کمپانی SHENB کره جنوبی تولید و در سال ۲۰۱۹ تولید آن متوقف شده است. NEMESIS به دلیل داشتن عملکرد قوی در زمینه لیفت و کاهش سایز، به سرعت بر سر زبان‌ها افتاد و جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کرد. پس از گذشت سال‌ها هنوز هم بسیاری از کلینیک‌ها و مراکز لاغری در شهرهای مختلف ایران از این دستگاه استفاده می‌کنند. اکنون پس از گذشت یک دهه، کمپانی SHENB کره جنوبی آراف و کیوم NEMESIS را با ظاهری جدید و امکاناتی پیشرفته‌تر از گذشته با نام آراف و کیوم VIVALINE به بازار جهانی عرضه کرده است.

رکورد فوق العاده فروش بیش از ۴۰۰۰ عدد  
دستگاه آراف و کیوم نمسیس در ایران و سراسر جهان



هندپیس آراف و کیوم صورت



هندپیس آراف و کیوم بدن



پلیت



ست دیسک خازنی



هندپیس ۳۰۰ کیلوهرتز



هندپیس ۵۰۰ کیلوهرتز



# ویوالاین

## یک آراف تمام عیار!



### ویوالاین چیست؟

VIVALINE یک دستگاه دوکاره با تکنولوژی‌های آراف و اندرمولوژی است. بر خلاف دستگاه‌های چندکاره موجود، ویوالاین یک آراف کامل است که به چهار عمق بافتی (اپیدرم، درم، هایپودرم و عضله) دسترسی دارد و می‌توان امواج رادیوفرکانسی را با توجه به اهداف مختلف در عمق‌های مختلف ایجاد کرد.

ویوالاین تمام آن چیزی است  
که از یک دستگاه لاغری انتظار دارید!

### لوازم جانبی

#### CET [0.3Mhz] + Suction

هندپیس مونوپلار خازنی به همراه ساکشن  
به جهت لیفت صورت و بدن  
به همراه لاغری موضعی، از بین بردن سلولیت و درناژ لنفی



#### BiPolar [1Mhz]

هندپیس بای‌پلار  
جهت لیفت و جوانسازی صورت و بدن



#### RET [0.5Mhz]

هندپیس مونوپلار مقاومتی  
به جهت لیپولیز، کاهش چربی احشایی و کاهش درد



#### Multi Suction Cup [0.3Mhz]

کاپ‌های مونوپلار خازنی به همراه ساکشن و پالس  
به جهت لاغری موضعی، کاهش دردهای عضلانی و از بین بردن سلولیت



#### Cream & Oil

کرم و روغن  
کرم مخصوص هندپیس مونوپلار و بای‌پلار  
روغن مخصوص آراف و کیوم




#### Ground Plate (Earth Electrode)

پلیت گراند مونوپلار اتواستریل  
توسط لامپ یووی که در زیر  
دستگاه قرار دارد استریل می‌شود



## اندیکاسیون‌ها

### VIVA-Face

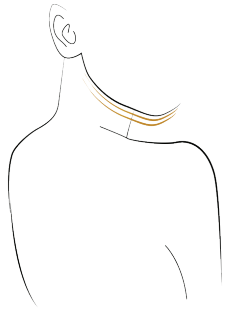


- Lifting
- Skin elasticity
- Double Chin
- Wrinkle improvement

### VIVA-Contouring




- Intra - abdominal fat
- Cellulite
- Obesity


### VIVA-Pain

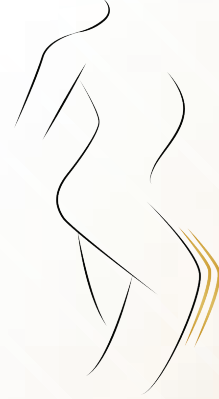

- Arthralgia
- Muscle ache
- Sprain
- Edema

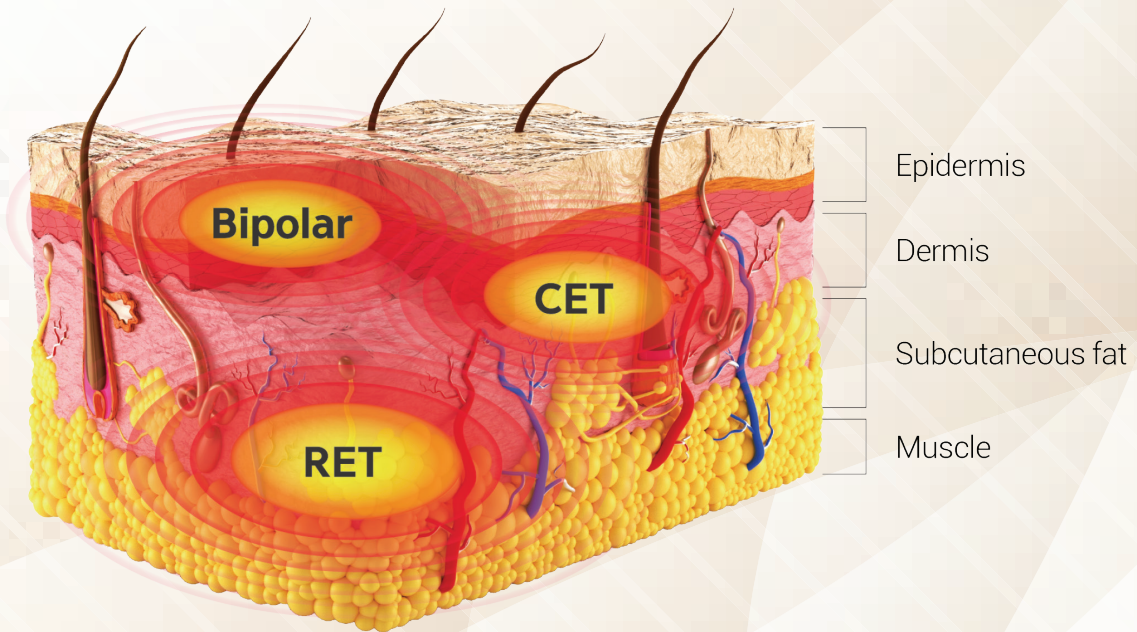

## ثبت اختراع تکنولوژی Cupping Sculpt – MSC

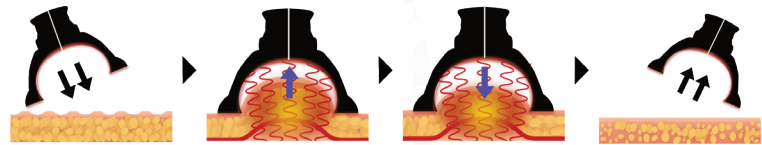

ویژگی منحصر به فرد و برگ برنده دستگاه ویوالاین استفاده از ترکیب مونوپلار خازنی و ساکشن به صورت همزمان است که ثبت اختراع انحصاری این کمپانی بوده و مشابه آن در سایر دستگاهها وجود ندارد. این کاپها به صورت هندزفری در موضع مدنظر متصل شده و به صورت همزمان امواج رادیوفرکانسی عمقی (۳/۵ کیلوهرتز) را به همراه ساکشن و پالسهای مکانیکی اعمال می‌کند که اثر سینرژی حاصل از این دو تکنولوژی نتایج شگفت‌انگیزی را با کاربری آسان به دنبال دارد.

**High Frequency**  
Skin, body, pain care

**Suction Pulse**  
Physical therapy using suction & release technology

**Deep Heat**  
Reach the energy even deeper




### مزایای استفاده از Cupping Sculpt – MSC

۱. افزایش گردش خون با ایجاد وکیوم
۲. انتقال امواج رادیوفرکانسی در عمق بیشتر بافت
۳. فرم‌دهی بهتر بافت به دلیل مکانو استیمولیشن
۴. کاهش سلولیت و لاغری موضعی و افزایش الاستیسیته بافت
۵. از بین بردن حالت فیبروتیک بافت‌های چربی
۶. افزایش سرعت کلاژن‌سازی و تحریک فیبروبلاست
۷. درناژ لنفی و تخلیه آب میان‌بافتی
۸. ایجاد حس ریلکسی و کاهش دردهای عضلانی

## طریقه عملکرد CET + Suction و Cupping Sculpt


این سیستم به دو صورت ترکیب آراف مونوپلار خازنی با ساکشن و ساکشن پالس عمل می‌کند. در حالت ساکشن امکان کار در تمامی نقاط بدن (صورت و بدن) وجود دارد و اپراتور می‌تواند با مانور دستی اندیکاسیون‌های مختلفی را پیاده‌سازی کند.

کاپ‌های ساکشن پالس به صورت هندزفری، بدون نیاز به اپراتور عمل می‌کنند که در نتیجه باعث صرفه‌جویی در زمان و انرژی می‌گردد. با قرار دادن کاپ‌ها روی موضع مورد نظر امواج رادیوفرکانسی به همراه ساکشن و پالس مکانیکی روی بافت مدنظر اعمال می‌شود. همچنین ترکیب آن با سایر هندپیس‌ها نتایج بهتری را به ارمغان می‌آورد. با توجه به جنس سرامیک خازنی کاپ‌ها، امواج رادیوفرکانسی از سطح پوست تا عمق Subcutaneous منتقل می‌شود که به دلیل افزایش گردش خون در Derm، لیفت و لیپولیز به صورت هم‌زمان اتفاق می‌افتد.

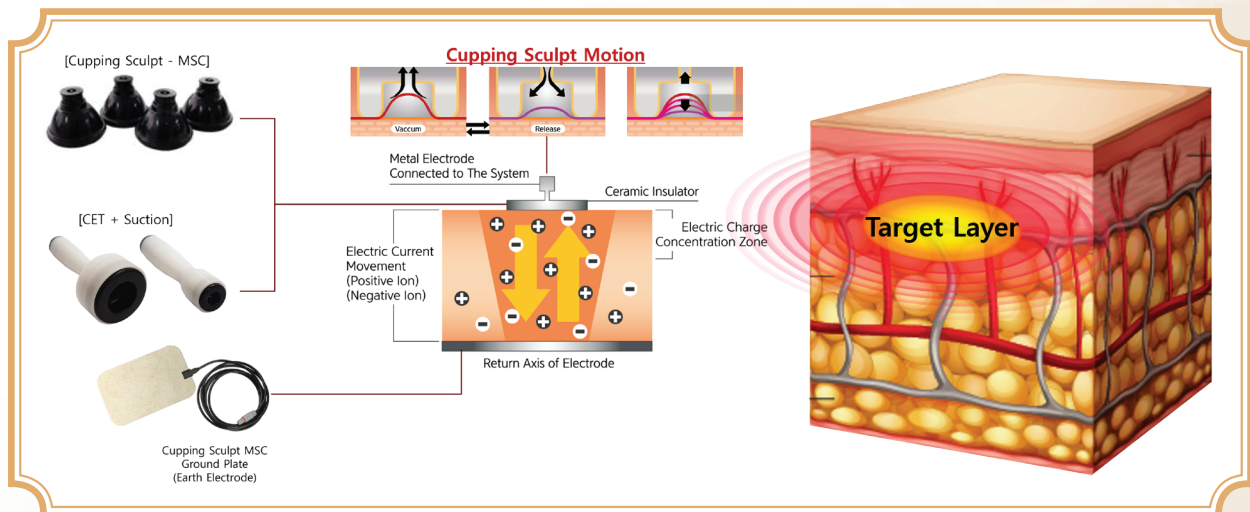


## طریقه عملکرد RET (MONO-POLAR)

در این حالت امکان ارسال امواج رادیوفرکانسی به عمیق‌ترین لایه‌ها وجود دارد. گرما از عمق شروع شده و می‌تواند روی چربی‌های عمقی (مانند چربی احشایی) اثر بگذارد. همچنین قابلیت کاهش دردهای عضلانی و مفاصل را نیز دارد.

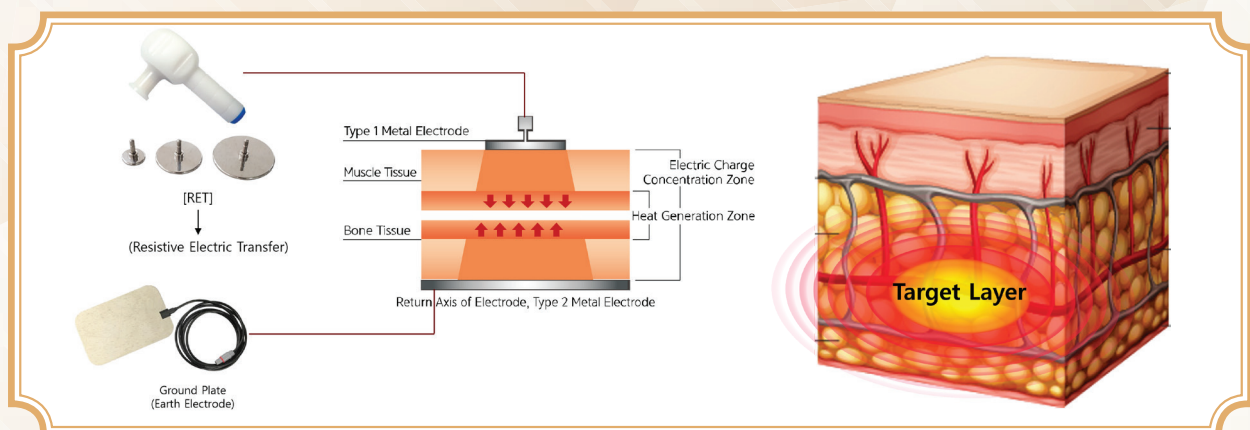


## طریقه عملکرد BIPOLAR

در این حالت به لایه‌های سطحی پوست (UperDerm و Derm) دسترسی داشته که با ایجاد گرما در لایه Derm باعث دناتوره شدن کلاژن شده و بعد از ترمیم، کلاژن‌های جدید جایگزین کلاژن‌های قدیمی شده که در نتیجه منجر به لیفت و جوانسازی می‌گردد. همچنین در این حالت فیبروبلاست تحریک شده و کلاژن‌های جدید نیز ساخته می‌شود و این پروسه تا چندین ماه بعد از جلسات رادیوفرکانسی نیز ادامه دارد.

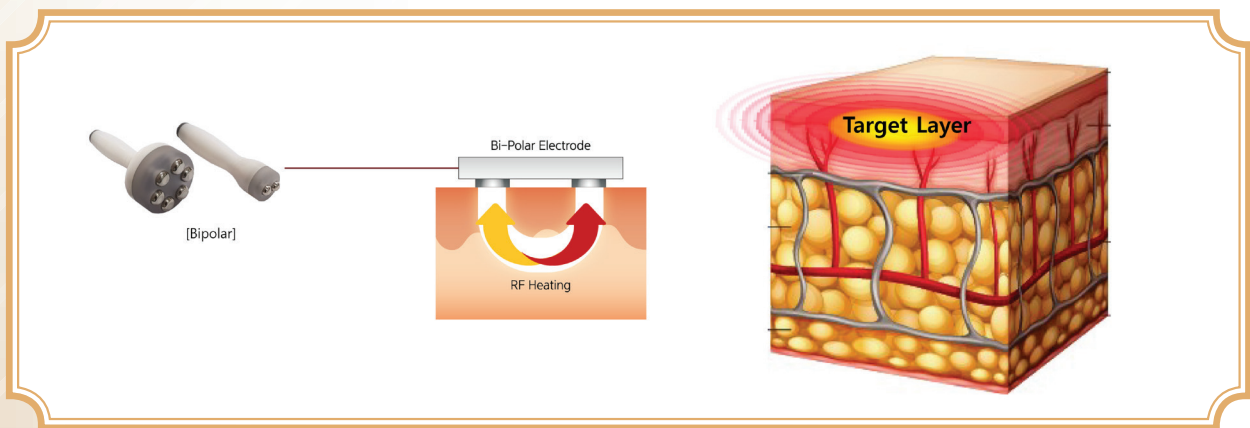

## مشخصات فنی

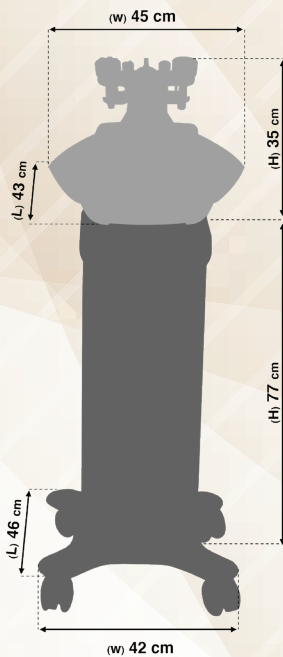

Electrical Voltage and Frequency	AC 220V, 50/60Hz
Power consumption	220VA
Weight	4.5kg
Dimension (with trolley)	(W)45cm x (L) 46cm x (H) 112cm
Components	Body, Cable, Handpiece, Suction Cup

## فخرف انضاب ابره آرف!

شرکت تجهیزات پزشکی آفرمد با سالها تجربه در حیطه لاغری، زیبایی و درمانی افتخار خدمت‌رسانی به مشتریان خود را داشته است و از سال ۲۰۲۱ به عنوان نمایندگی انحصاری کمپانی معتبر SHENB کره‌جنوبی، که تولیدکننده دستگاه‌های آراف و کیوم NEMESIS و VIVALINE است در ایران شناخته می‌شود.

تلفن تماس: ۰۲۱۴۸۰۰۰۰۲۸

پاسخ گوی آنلاین در واتساپ، تلگرام و بله:

۰۹۳۳۶۱۱۰۴۰۵

آیدی شبکه های اجتماعی:

 AfarMedic

آدرس وبسایت:

 [www.AfarMed.com](http://www.AfarMed.com)

آدرس:

تهران، جنت آباد مرکزی، خیابان  
رجب‌صلاحي، پلاک ۲۶، برج آتی، طبقه  
ششم، واحد شرقی

فکس:

 ۰۲۱۴۵۸۱۲۶۸۴

کد پستی:

 ۱۴۷۵۷۶۵۹۴۱

## ارتباط با ما